FICHA TECNICA CAT III

MASCARILLA PROTECCION FFP2

CLASIFICACION SEGÚN LA NORMA: EN 149:2001 + A1:2009

TIPO: MASCARILLA FILTRANTE - NR FFP2

CERTIFICADO CE 0161 : CERTIFICACION №20/3327/00/0161 (AITEX)

REFERENCIA MASCARILLA: 03021960

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

*COMPOSICION MASCARILLA 5 CAPAS:

1º CAPA POLIPROPILENO SPUNBOND

2º CAPA MELT-BLOWN

3º CAPA AIR COTTON

4º CAPA MELT-BLOWN

5º CAPA POLIPROPILENO SPUNBOND

- *DOBLE GOMA DE AJUSTE SIN LATEX
- *CLIP NASAL PARA AJUSTE
- *MASCARILLA NO REUTILIZABLE

INFORME DE ENSAYO AITEX №2020EC4248

INSPECCION VISUAL: CUMPLE

PENETRACION DEL FILTRO CON ACEITE PARAFINA : 97,4% CUMPLE PENETRACION DEL FILTRO CON CLORURO SODICO : 99,4% CUMPLE

CONTENIDO DE CO2 EN AIRE INHALADO : *CUMPLE* RESISTENCIA A LA RESPIRACION : 2,2 l/m *CUMPLE*

INFLAMABILIDAD: CUMPLE

DETERMINACION DE LA FUGA HACIA EL INTERIOR : CUMPLE

COMPORTAMIENTO PRACTICO: CUMPLE



INSTRUCCIONES DE USO

- 1. Sujetela con una mano, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
- 2.Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz
- 3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
- 4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de las mascarillas están en contacto directo con la cara.
- 5.Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes , modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita esta proceso hasa que no detecte ninguna fuga.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

*Almacenamiento en interiores con humedad inferior al 80% sin gases corrosivos y bien ventilado, lejos del calor.

ETIQUETADO Y EMBALAGE DEL PRODUCTO

El etiquetado del producto cumple con los requesitos de la normativa EN 149:2001+A1:2009. Embalage en cajas de 20 unidades embolsadas individualmente.

Contenido de caja: 27 cajas de 20u total 540u.

DISEÑO MASCARILLA Y EMBALAGE







