

# Instrucciones para Inyecciones Dentales


El proceso de preparación del sistema de inyección Comfort-in™ para su uso en una clínica dental es simple y fácil. La primera vez tomará unos minutos configurarlo, pero se volverá más rápido con la práctica.

## Preparación del inyector - Carga del resorte:

Abra las alas de la palanca de presión hasta que sean visibles las tres partes de la palanca.



Inserte la cabeza del inyector en el soporte del inyector como se muestra en las imágenes. Inserte la barra de presión en el orificio de la cabeza del inyector.

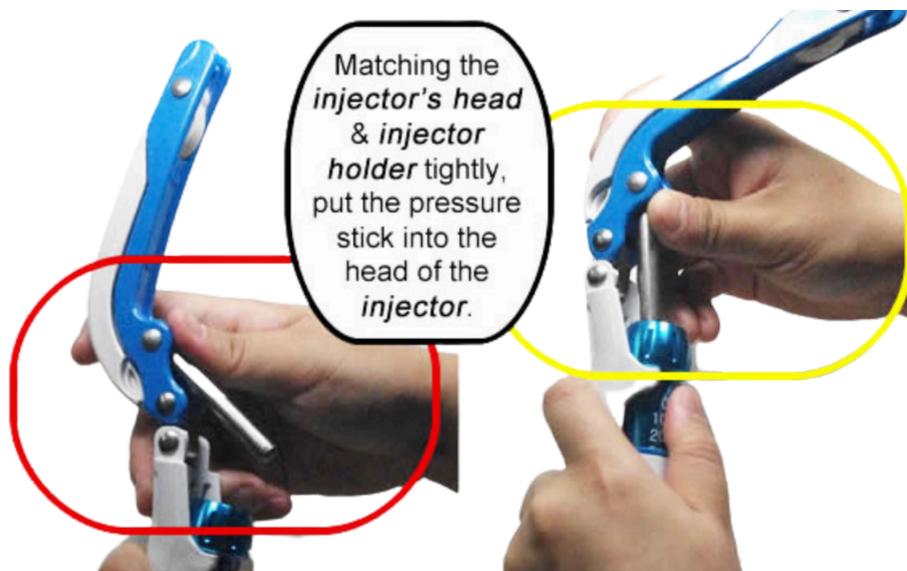

## Carga del anestésico en jeringas sin aguja:



1. Cargue su jeringa dental estándar con el anestésico de su elección.
2. Monte el adaptador en lugar de la aguja hipodérmica.
3. Saque una jeringa (boquilla) del paquete estéril y empuje el émbolo hacia adentro para liberarlo. Luego, tire de él hacia atrás y hacia adelante para aflojarlo y finalmente regrese a su estado original.
4. Acople la jeringa (boquilla) al adaptador. Con una mano sostenga el adaptador y con la otra gire la jeringa (boquilla) en sentido horario para bloquearla.
5. Inyecte lentamente el anestésico en la jeringa sin aguja hasta la dosis deseada. Repita estos pasos para llenar tantas jeringas como necesite.
6. Antes de comenzar el tratamiento, tenga listas de 2 a 3 jeringas llenas con el anestésico.

## IMPORTANTE:



- Tenga una jeringa llena con una dosis pequeña de anestésico (0,15 - 0,20 ml) para la primera inyección.
- Asegúrese de que la dosis en la jeringa coincida con los números en la parte azul del inyector.
- Evite que el anestésico contenga aire o burbujas atrapadas.
- Acople la jeringa llena al inyector enroscándola firmemente.
- Cubra el inyector con una funda desechable si así lo precisa. NO esterilice el inyector en autoclave.

## Proceso de inyección:

1. El paciente debe estar en posición supina para mejor acceso y comodidad.
2. La primera inyección debe ser una dosis baja (0,15 - 0,20 ml) como prueba de sensibilidad.
3. Espere unos minutos y observe si el paciente muestra signos de hipersensibilidad. Si es así, detenga el tratamiento y registre el tipo de anestésico usado.
4. Antes de inyectar, tire de la mejilla para exponer el vestíbulo en el sitio de la inyección.
5. Coloque la punta de la jeringa en contacto con el vestíbulo.
6. Ajuste el inyector en un ángulo alejado del hueso para que el anestésico se inyecte directamente en el vestíbulo.
7. No aumente demasiado el ángulo del inyector para evitar daño óseo.
8. Tras la inyección, mantenga la punta del inyector presionada contra el sitio de la inyección por unos segundos y realice movimientos circulares suaves para distribuir el anestésico y evitar sangrado.



Para cualquier duda, puede ver los videos adjuntos en nuestra página web

<https://ytsmed.com/comfort-in/videos-comfort-in/>

<https://ytsmed.com/comfort-in/videos-instructivos-comfort-in/>

Estamos a tu lado para conseguir que la anestesia con dolor sea un recuerdo del pasado. Contacta con nosotros si necesitas asesoramiento.

# 601 51 64 63

Horario de 10:00 – 19:00

**Dirección** Gaspar Aguilar 107 Valencia46017

**Email** tienda@ytsmed.com

**YTSmed**  
MATERIAL SANITARIO